

COLCHÓN

ANTIESCARAS DE FLOTACIÓN SECA



El colchón antiescaras de flotación seca, posee celdas de aire flexible e interconectadas para un ajuste individualizado protegiendo la piel y el tejido blando contra el deterioro, evitando la formación de escaras.

Dentro de sus propiedades y características podemos destacar, es hipoalergénico, posee una funda exterior fácil de remover, resistente al fuego, libre de látex, antitranspirante, fácil instalación y retiro, fácil de limpiar y desinfectar, antihongos y cuenta con broches para unión de las 3 secciones.



contactos@medicalsupplierchile.cl



+56 9 20762615



www.medicalsupplierchile.cl

El colchón antiescaras se adapta a la forma del cuerpo de cada persona para brindar la protección de la piel gracias a su superficie inflable, flexible, zonificada y completa.



Se puede dividir en tres secciones independientes para diferentes usos. Cada sección posee celdas de aire flexibles e interconectadas ayudando a equilibrar la presión y adaptarla al entorno corporal, creando un ambiente cómodo para estar acostado durante largos períodos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC/TPU resistente al fuego
Altura	12 cm
Ancho	90 cm
Largo	Seccion: 70 cm Completo: 205 cm
Límite de peso	150 kg
Garantia	12 meses
Incluye	3 secciones de colchón armables, manual de instrucciones, bombín manual bidireccional, kit de reparación, correas para colchón y funda.



contactos@medicalsupplierchile.cl



+56 9 20762615



www.medicalsupplierchile.cl

FUNCIONALIDAD CLINICA

- Alivia la presión en zonas críticas como sacro, talones y caderas.
- Mejora la circulación sanguínea en pacientes con movilidad reducida.
- Controla la humedad y facilita la ventilación para mantener la piel seca
- Disminuye lesiones cutáneas en pacientes críticos.
- Mayor confort y seguridad en procedimientos.
- Ahorro de tiempo y menos complicaciones.
- No interfiere con cuidados críticos.
- Reduce riesgo de infecciones.
- Inversión confiable y sostenible.

PARA QUIENES SE RECOMIENDA

- Pacientes o residentes en etapa de prevención de Lesiones por presión (LPP).
- Pacientes o residentes en tratamiento de LPP grado I a II, en zonas occipitales, sacra y/o talones.
- Pacientes tetraplégicos, ELA, otros.
- Pacientes con patologías neurodegenerativas.
- Pacientes con daño neurológico o parálisis cerebral.
- Pacientes postrados con baja o nula sensibilidad.
- Adultos mayores.



contactos@medicalsupplierchile.cl



+56 9 20762615



www.medicalsupplierchile.cl

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Antes de comenzar con la limpieza todas las valvulas deben estar cerradas, no debe permitir que entre agua ni soluciones de limpieza en el producto.
- Los siguientes productos pueden dañar el colchón, abrasivos (lana de acero, estropajos); detergente cáustico para vajillas, productos de limpieza que contengan petroleo, acetona y tolueno, liquido de limpieza seco, removedor de adhesivo, lociones con base de aceite, método de limpieza con luz ultravioleta.
- Para realizar limpieza, debe retirar todas las correas, cierre las valvulas y coloque el colchón en un recipiente grande. Lave a mano con jabón liquido suave para mano, detergente para ropa o detergente multiusos. Frote suavemente todas las supeficies del producto con un cepillo de cerdas de plástico suave, una esponja o un paño. Enjuague con agua limpia. Seque al aire. No lo exponga a la luz solar directa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- No debe ser utilizado por bebés ni personas con riesgo de asfixia.
- No utilizar producto desinflado o sobreinflad, debido a que su beneficio de reducirá o eliminará.
- No exponga el producto a altas temperaturas.
- No se recomienda su uso con rayos X.
- Riesgo de Caídas:
 - 1.El colchón debe estar fijado al colchón de la cama, con las correas que incluye.
 - 2.El colchón de flotación seca no debe sobresalir de los bordes del colchón de la cama.
 - 3.Asegurese que el colchón de la cama este en una posición plana.



contactos@medicalsupplierchile.cl



+56 9 20762615



www.medicalsupplierchile.cl

GARANTÍA

- Nuestro colchón cuenta con una garantía de 12 meses y cubre fallas y defectos que se demuestren que son atribuibles a una fabricación defectuosa.
- La garantía no cubre el desgaste por uso normal, las consecuencias de un manejo inadecuado o daños, mantenimiento deficiente y puesta en marcha o montaje incorrecto por parte del comprador o de un tercero.
- Las piezas de desgaste no están cubiertas por la garantía.
- La garantía se anulará si se realizan modificaciones al producto que no estén autorizadas por el fabricante.



contactos@medicalsupplierchile.cl



+56 9 20762615



www.medicalsupplierchile.cl